



PowerMini™ – NEU

Sofortige magnetische Energie für unterwegs

- Exklusive DynaFlux® Magnettechnologie mit 750 Gauß
- Handliches Etui für einen kompletten Satz von 12 PowerMini™ Magneteinheiten mit Klebepflastern
- Magneteinheiten und Klebepflaster sind wasserfest
- Hautfreundliche glatte Oberfläche und medizinischer Kleber

Die neuen PowerMini™ Magneteinheiten, die kleinsten Magnetprodukte von Nikken, können beinahe überall auf der Haut angebracht werden. Mithilfe der Pflaster, die in einem speziellen Etui aufbewahrt werden, können Sie die Magneteinheiten an der gewünschten Stelle anbringen und so von der fortschrittlichen DynaFlux® Energie profitieren.

Der wasserfeste PowerMini™ ist so klein, dass Sie ihn in Ihrer Handtasche oder in Ihrem Geldbeutel stets bei sich tragen können, und die Magneteinheiten können ohne Funktionsverlust beliebig oft wieder verwendet werden.

Anwendung

Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig, damit die kleinen Magneten nicht herausfallen, und entnehmen Sie einen PowerMini™ Magnet, indem Sie gegen die Gehäuseunterseite drücken. Ziehen Sie den Film von der Haftscheibe ab und kleben Sie sie auf die flache Seite des PowerMini™. Bringen Sie nun den PowerMini™ Magnet auf der Haut an. Der

PowerMini™ kann bis zu 3 Tage getragen werden. Siehe dem Produkt beiliegende Gebrauchsanweisung.

Pflegehinweise

Der Magnet kann mit einem feuchten Tuch und mildem Reiniger gereinigt werden. Vorsichtig trocken tupfen.

Wichtige Hinweise

Nicht direkt auf Schnitt- oder Schürfwunden, verletzte oder beschädigte Hautstellen aufkleben. Beim Auftreten von Hautreizungen sollten Sie das Klebepflaster nicht mehr verwenden. Erstickungsgefahr – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Technologie	DynaFlux® Magnettechnologie
Umfang/Abmessungen	12 Magneten (Durchmesser 1 cm), 24 Haftscheiben (Durchmesser 2,5 cm)
Magnetstärke	750 Gauß
Materialien	Strontiumferritmagneten, runde selbstklebende Gewebepflaster.

3025 PowerMini™